

# A CERUMEN HIGIENA USZU

A-CERUMEN jest łagodnym środkiem przeznaczonym do higieny uszu, zawierającym substancje powierzchniowo czynne.

Stosowany regularnie, pomaga w usuwaniu złogów woskowiny oraz zapobiega ponownemu gromadzeniu woskowiny.

Rozpuszcza również korki woskowinowe.



1. Informacje umieszczone na stronie internetowej producenta; www.acerumen.com.

2. M.L. Macknin, H. Talo, S.V. Medendorp, „Effect of cotton-tipped swab use on earwax Occlusion”, Clinical Pediatrics, 33 (1994), pp.14-18.

3. M.B. Skarżyńska, P.H. Skarżyński, „Higiena uszu oraz problem powstawania korka woskowinowego”, Kompendium pediatrii 2019, Forum Pediatrii Praktycznej.

\* Tolerance, eacute et acceptabilit  du produit a l'essai « a-cerumen, hygiene auriculaire » visant a prevenir l'apparition du cerumen - test sous controle orl. Janvier 2012, RAPPORT FINAL TCH023/PDC01632/VT2694/RF1

GL/PL/ACE/JULO/13/10-2023

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ LUB ETYKIETĄ.**

# A CERUMEN HIGIENA USZU

## PORZĄDKI W UCHU

Rozdrabnia i usuwa czopy woskowiny

**SURFAKTANTY**  
UNIKALNY SKŁAD



Trójstopniowa eliminacja korka woskowinowego

Skład bez konserwantów



**glenmark**

PRODUCENT: Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du G n ral de Gaulle 14200 H rouville Saint-Clair, Francja  
DYSTRYBUTOR I PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o., Polska

**GILBERT**


## BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ A-CERUMEN<sup>1</sup>

**Uczestnicy badania:** osoby z nadmiernym wydzielaniem woskowiny powodującym dyskomfort słuchowy lub osoby odczuwające efekt zatkanego ucha po prysznicu lub myciu głowy; 59 osób; wiek 19-69 W ciągu 14 dni poprzedzających badanie ochotnicy nie mogli czyścić uszu.

**DO** - laryngolog czyści oba kanały słuchowe osób biorących udział w badaniu.

**Od D1 do D21** - ochotnicy stosują A-cerumen do jednego ucha, dwa razy w tygodniu. Nie mogą stosować żadnego innego środka do czyszczenia uszu, ani uczęszczać na basen.

**D21** - ocena skuteczności produktu wydana przez lekarza badającego.

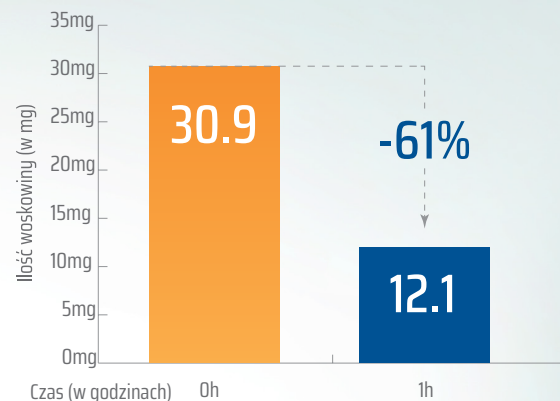

### Badanie potwierdzające skuteczność A-cerumen\*:

Zmiękczenie woskowiny

u **96%** osób


Regulacja produkcji woskowiny

u **94%** osób

Zapobieganie powstawania woskowiny


u **90%** osób

### Ocena skuteczności A-cerumen:

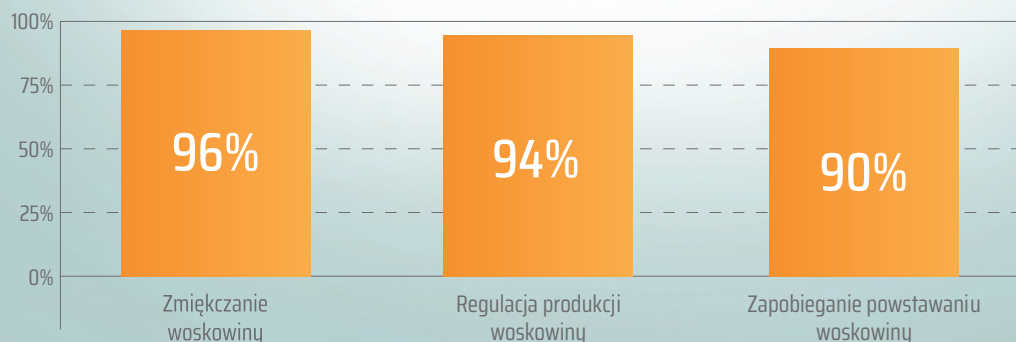

Już po 1 godzinie od aplikacji A-cerumen rozpuszcza do **61% woskowiny**<sup>1</sup>

## STOSOWANIE I DZIAŁANIE

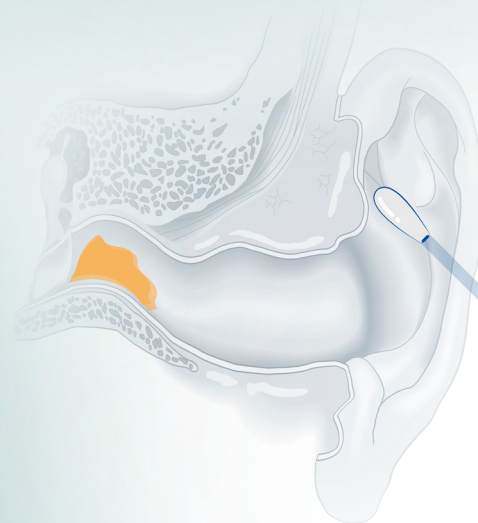

### Stosowanie patyczków a powstawanie korka woskowinowego<sup>2, 3</sup>:

W populacji dzieci w wieku między 2. tyg.ż.-18 r.ż aż 75% przypadków uformowania korka woskowinowego było wynikiem stosowania patyczków higienicznych

### Działanie środków powierzchniowo czynnych:

- Rozpuszczają substancje tłuszczowe poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego między dwiema powierzchniami
- Zapobiegają przywieraniu brudu do powierzchni kanału słuchowego
- Posiadają właściwości rozpuszczające tłustą konsystencję woskowiny

### A-cerumen dzięki kompozycji substancji powierzchniowo czynnych rozpuszcza korki woskowinowe w 3 etapach<sup>1, 2</sup>:



Osadzenie A-cerumenu na korku woskowinowym



Fragmentacja korka woskowinowego



Rozpuszczenie korka woskowinowego

