

StickOff®

Instrukcja używania



Spray 50 ml

Spis treści:

1. Co to jest **StickOff®** i w jakim celu się go stosuje?
2. Skład
3. Ważne informacje przed zastosowaniem
4. Jak stosować **StickOff®**
5. Możliwe działania niepożądane
6. Jak przechowywać **StickOff®**/ ostrzeżenia
7. Pozostałe informacje

1. Co to jest **StickOff®** i w jakim celu się go stosuje?

Wyrób medyczny **StickOff®** to spray ułatwiający usuwanie i służący do redukcji bólu towarzyszącego usuwaniu wszelkiego rodzaju plastrów, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących, m.in.

- włókninowych,
- wodoodpornych,
- kinesiotapingowych,
- nikotynowych,
- hormonalnych,
- rozgrzewających.

Wyrób medyczny **StickOff®** przeznaczony jest do stosowania u noworodków, dzieci i dorosłych.

StickOff® może być stosowany u osób o skórze wrażliwej, pacjentów z ciężkimi chorobami skóry, np. cierpiących na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB), pacjentów z oparzeniami.

Mechanizm działania wyrobu opiera się na wykorzystywaniu właściwości nawilżających głównego składnika wyrobu, który zmiękcza i rozpuszcza kleje powlekające podłoża plastrów.

StickOff®:

- całkowicie usuwa klej ze skóry
- nie zawiera alkoholu,
- nie wysusza i nie podrażnia skóry.

StickOff®:

- szybko wysycha,
- pozostawia skórę gotową na zastosowanie kolejnego opatrunku.

StickOff®:

- jest łatwy w użyciu,
- aplikacja możliwa pod dowolnym kątem,
- doskonały do stosowania w trudno dostępnych miejscach na ciele.

2. Skład

Heksametylodisiloksan.

3. Ważne informacje przed zastosowaniem

Przeciwwskazania

Wyrobu **StickOff®** nie należy stosować, jeżeli:

- opakowanie jest uszkodzone,
- po upływie daty ważności,
- w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na składnik wyrobu.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu, skórę spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Stosować w pomieszczeniach wentylowanych, nie wdychać rozpylonego wyrobu.

Nie należy stosować na uszkodzoną skórę.

Nie stosować bezpośrednio na oczy. W przypadku dostania się wyrobu medycznego **StickOff®** do oczu, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeśli objawy podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.


Nie połykać wyrobu medycznego **StickOff®**. Przy połknięciu NIE wywoływać wymiotów. Dokładnie wypłukać wodą usta. W przypadku pojawienia się objawów zatrucia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Jak stosować **StickOff®**

W celu osiągnięcia najlepszego wyniku, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Opatrunki na włókninie

1. Nanieść preparat na przyklejony plaster lub przylepiec i odczekać kilka sekund, aż powierzchnia plastra będzie wilgotna.
2. Delikatnie usunąć opatrunek. W zależności od potrzeb, w przypadku mocno przyklejonego plastra powtórzyć aplikację.

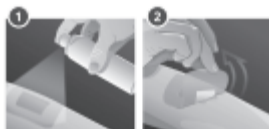

Plastry wodoodporne, kinesiataping, plastry nikotynowe, hormonalne, rozgrzewające i inne.

- Odkleić róg plastra i nanieść preparat między plaster a skórę (rys 1).
- Następnie delikatnie odklejać plaster, aplikując jednocześnie preparat (rys 2).



U noworodków lub w okolicach oczu

- Zaaplikować niewielką ilość wyrobu do nasadki pojemnika (rys 1).
- Zamoczyć patyczek higieniczny w preparacie i nanieść go na opatrunek (włókninowy) lub pod niego (wodo-odporny) (rys. 2). Odczekać kilka sekund i delikatnie usunąć opatrunek



Preparat wysycha bardzo szybko, nie utrudniając przyklejenia kolejnego plastra/ przyłepca. Może być stosowany również do usuwania ze skóry starych pozostałości kleju. Wyrób medyczny **StickOff®** stosować tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją używania. Stosować w miarę potrzeb. **Aplikacja wyrobu medycznego u dzieci powinna odbywać się pod nadzorem osób dorosłych.**

5. Możliwe działania niepożądane

Wyrób medyczny **StickOff®** jest dobrze tolerowany i nie są znane żadne działania niepożądane po jego zastosowaniu. W razie wystąpienia objawów alergii lub innych działań niepożądanych należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

6. Jak przechowywać StickOff®/ ostrzeżenia

Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
- Unikać uwolnienia do środowiska - po zużyciu zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Chronić przed dziećmi.

Data ważności i nr serii znajdują się na spodzie opakowania i na kartoniku.

7. Pozostałe informacje

StickOff® to wyrób medyczny I klasy.

Opakowanie: Pojemnik wielodawkowy o objętości 50 ml netto, zawierający 160 pojedynczych dawek. Pojemnik jest pod ciśnieniem.

Producent: EmergoPharm Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa

Dystrybutor w Polsce: Chiesi Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
tel.: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79
e-mail: info-pl@chiesi.com

Wyjaśnienie zastosowanych symboli

Znak zgodności CE

Producent

Numer serii

Zużyć przed końcem

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI)

Wyrób medyczny

Materiały z włókien celulozy, zdolne do recyklingu i biodegradowalne - inny papier, mieszany, tekstura

Wykonano z aluminium

Skrajnie łatwopalny aerozol

Opakowanie aeroszowe - produkt spełnia wszelkie polskie i europejskie wymagania

Zatrzyj do instrukcji używania

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 19.07.2024

07.2024A_PL_IFU / ST-1-1-4-7-IFU-w.1